

Pouvons-nous vous proposer notre
nouveau Kiss ?
Réduit, perfectionné et tout simplement
solide.

Duceram

Keep it simple and safe.



DENSPLY
DeguDent

Réduit et perfectionné.



Six bonnes raisons de choisir le concept Kiss

1.

CE 0124 Duceram Kiss est notre nouvelle céramique basse fusion pour facettes, possédant un CDT classique de 13,8 – 15,4 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$.

Avec 73 masses céramiques seulement, Duceram Kiss fixe de nouvelles limites à l'éventail des possibilités fonctionnelles. L'esthétique n'a pas pour autant à en souffrir, car ces nouvelles céramiques présentent une stabilité des couleurs nettement améliorée. Mais comment s'y est-on pris pour réduire autant l'éventail habituel de 110 à 120 masses sans y perdre en qualité ?

Il y a trois moyens :

D'abord, une nouvelle teinture des masses de dentine et des opaques, qui permet de se dispenser d'ajouter des masses intensives pour les recouvrements de base adaptés aux couleurs des dents naturelles.

Ensuite, une catégorisation plus précise des masses intensives et incisales.

Enfin, une nouvelle didactique qui combine intelligemment couleurs, effets et matériaux.

Le nouveau système complet tient dans une mallette qui contient tout ce dont vous avez besoin pour tous vos travaux prothétiques.

2.


L'optimisation des pigments a permis d'accroître une fois encore la fidélité aux couleurs des dents naturelles avec Duceram Kiss. Elle résout en outre presque totalement le problème de métamérisme, autrement dit de différences d'aspect selon les sources de lumière (éclairage intérieur, lumière du jour...). Kiss vous permettra d'obtenir plus rapidement et plus facilement des facettes de grande qualité pour les applications les plus exigeantes.

3.

La masse opalescente, qui contribue à un comportement dynamique naturel de la restauration à la lumière, a été optimisée au long d'un patient processus de fabrication. Dans les céramiques classiques à haute fusion, l'opalescence peut diminuer au fil des cuissons. Avec Duceram Kiss, elle est visiblement préservée.



Une gamme réduite au strict minimum.

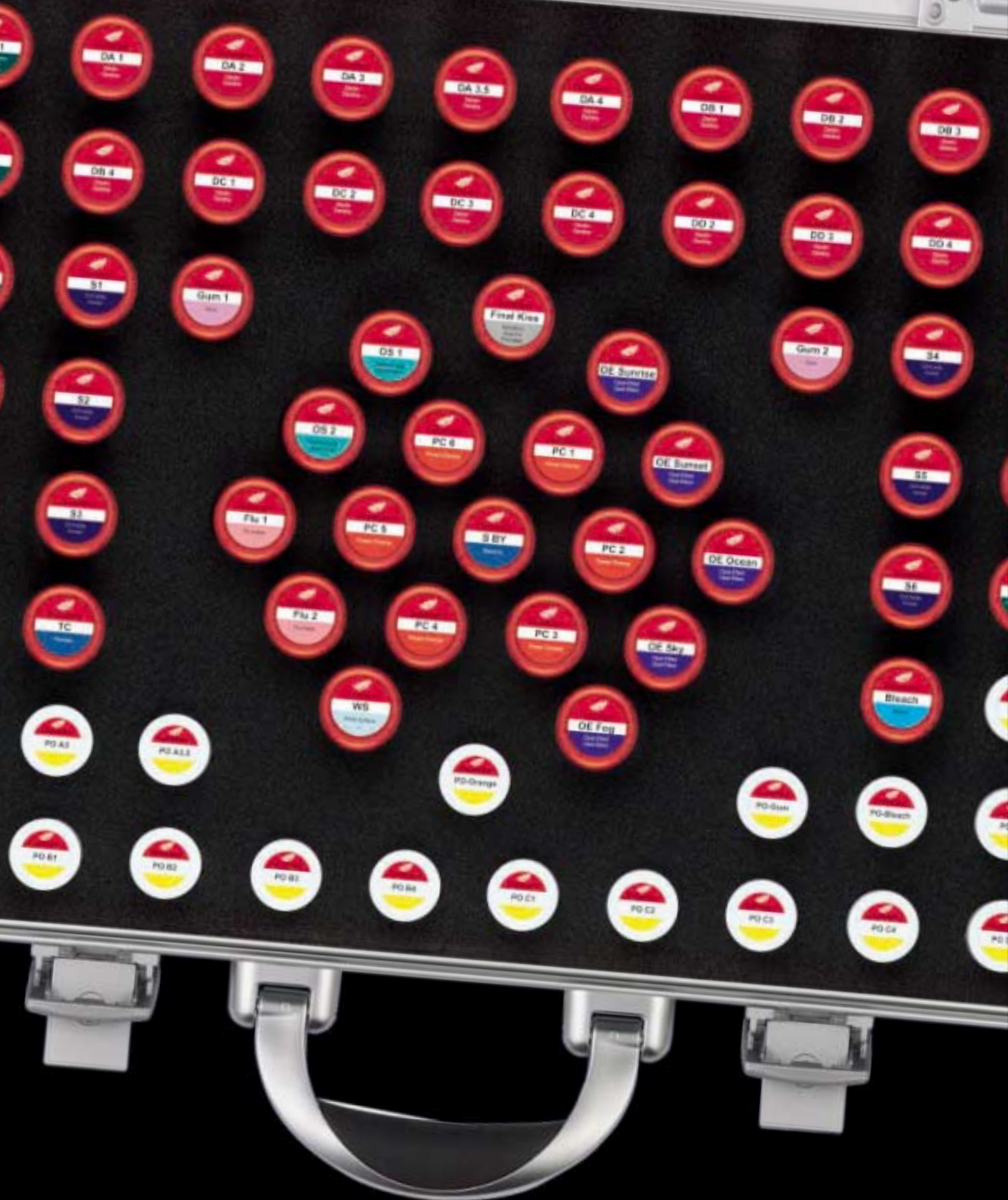

Un maximum d'esthétique.



Opale fritté Duceram Kiss

Duceram Kiss vous permet de définir votre niveau d'esthétique personnel, en fonction des capacités de votre laboratoire. Duceram Kiss se compose de deux éléments utilisables séparément ou en combinaison :

Ligne Esthétique de base

Pour un recouvrement rationnel et économique.

La teinte, l'adaptation chromatique, la luminance et la fluorescence des opaques et des dentines sont soigneusement harmonisées. Les couleurs des dents naturelles sont ainsi faciles à reproduire précisément, quelle que soit l'épaisseur de la couche de dentine. Six incisaux standard sont définis en fonction des couleurs naturelles afin d'obtenir un résultat esthétique optimal.

Ligne Esthétique individualisée

Pour une couronne de haut de gamme.

Des mélanges à parts égales simples et définis de masses vous offrent un large éventail de nuances supplémentaires qui vous permettront de donner un aspect naturel aux prothèses les plus complexes et les plus difficiles. DeguDent a réussi à se rapprocher encore plus des effets dynamiques naturels sous l'action de la lumière.



Tout simplement solide.



4.

Degudent Kiss est un alliage à forte teneur en or contenant du palladium, qui possède une excellente solidité et qui est facile et fiable à mettre en œuvre.

- pas de refroidissement de longue durée grâce à des CDT peu élevés
- très peu de retrait, donc convient idéalement pour les grandes structures implantaires
- chauffage rapide possible
- toutes dimensions de bridges
- oxyde clair

5.

BiOclus HT est un bio-alliage solide et éprouvé, mis en œuvre avec succès depuis plusieurs années. Sans palladium ni cuivre, l'alliage a une vive teinte jaune d'or.

- coulée sûre et simple
- excellent comportement au polissage
- dérochage simple et rapide
- large spectre d'indications
- oxyde clair

6.

Faire simple et sûr : c'est encore selon ce principe qu'a été conçu le nuancier Kiss, qui vous permet de trouver rapidement et facilement les masses de céramique Kiss dont vous avez besoin pour reproduire les couleurs des dents naturelles. Lorsque vous choisissez une couleur V, toutes les autres couleurs associées apparaissent automatiquement dans les cinq champs du bas.

Le doseur Kiss est le prolongement logique du nuancier, et indique pour chaque zone de recouvrement les mélanges 1:1 appropriés, par exemple pour les Power Chromas. L'utilisation du doseur permet un mélange défini et absolument reproductible de deux masses.

Pour en savoir plus ou pour
passer une commande :

www.degudent.com

