



















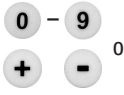



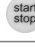














Guida rapida Multimat® Easy

Per informazioni dettagliate consultare le Istruzioni per l'Uso.

I

#	Operazione	Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 5	Passo 6
1	Accensione/ spegnimento	 Interruttore a levetta ON					
2	Stand-by	Premere il tasto  on/off					
3	Elevatore su/giù	Premere i tasti 					
4	Lancio del programma	Premere il tasto 	Inserire il numero di programma con il tastierino numerico 	Confermare con il tasto Invio 			
5	Programmare	Premere il tasto Invio 	Scorrere i parametri di cottura con i tasti cursore 	Modificare i parametri di cottura con il tastierino numerico 	Confermare con il tasto Invio 		
6	Salvare il programma	Premere il tasto 	Inserire il numero di programma con il tastierino numerico 	Confermare con il tasto Invio 			
7	Avviare/interrompere il programma	Premere il tasto  start/stop					
8	Copiare il programma	Premere il tasto 	Inserire il numero del programma da copiare con il tastierino numerico 	Confermare con il tasto Invio 	Premere il tasto 	Mit Zehnertastatur  Programmnummer eingeben	Confermare con il tasto Invio 
9	Modificare i parametri di cottura durante la cottura o per una singola cottura	Premere il tasto Invio 	Scorrere i parametri di cottura con i tasti cursore 	Modificare i parametri di cottura con il tastierino numerico 	Confermare con il tasto Invio 		
10	Impostazioni di menu	Premere il tasto  Menu	Selezionare il menu con i tasti cursore  e premere il tasto Invio 	Selezionare il sottomenu con i tasti cursore  e premere il tasto Invio 	Inserire i parametri con i tasti cursore  oppure con il tastierino numerico 	Confermare con il tasto Invio 	Premere il tasto fino  a quando riappare il programma
11	Attivazione raffreddamento rapido	Premere il tasto 					
12	Disattivazione raffreddamento rapido	Premere il tasto 					
13	Attivazione messaggi di informazione	Premere il tasto Indietro  für Nein o il tasto Invio  per Si					