























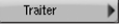

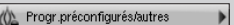


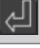












Mode d'emploi (résumé) Multimat® NTX/NTX^{press}

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel. Valable à partir de la version 3.0

#	Action	1 ^{ère} étape	2 ^{ème} étape	3 ^{ème} étape	4 ^{ème} étape	5 ^{ème} étape
		6 ^{ème} étape	7 ^{ème} étape	8 ^{ème} étape	9 ^{ème} étape	10 ^{ème} étape
1	Mise en marche/ à l'arrêt	Actionner le com- mutateur principal 	Lancer l'autotest manuellement	A la fin de l'autotest, faire «1 x suivant» en actionnant la touche correspondante!	Dès que le menu principal s'affichera, le four sera opérationnel	
2	Montée/descente	Utiliser les touches 				
3	Charger le programme	Presser la touche 	Entrer le numéro du programme à l'aide du pavé numérique	Valider avec 		
4	Chercher programme PRESSEE/CUISSON	Presser la touche  ou 	Sélectionner le programme (préconfiguré ou personnalisé)	Effleurer la barre de défilement (sélection vers le haut/vers le bas)	Sélectionner le dossier contenant la céramique souhaitée	Sélectionner le programme de cuisson/pressée
5	Chercher programme avec 	Sélectionner le programme (préinstallé ou personnalisé)	Effleurer la barre de défilement (sélection vers le haut/vers le bas)	Sélectionner le dossier contenant la céramique souhaitée	Sélectionner le programme de cuisson/pressée	
6	Démarrer/annuler programme	Presser la touche  ou 	Sélectionner le programme (préinstallé ou personnalisé)	Effleurer la touche «Start» 	Arrêt: effleurer la touche 	Après Arrêt: valider la fenêtre d'information en faisant «OUI»
7	Modifier paramètre de cuisson avant cuisson (une fois)	Charger le programme comme indiqué aux étapes 3 à 5 ci-dessus	Sélectionner paramètre de cuisson	Changer valeur avec pavé numérique	Valider avec 	Pour démarrer, presser touche  ou 
8	Modifier paramètre de cuisson pendant cuisson (une fois)	Charger le programme comme indiqué aux étapes 3 à 5 ci-dessus puis le démarrer comme indiqué pour l'étape 6 ci-dessus	Passer de l'affichage «graphique» à l'affichage «paramètres»	Changer valeur avec pavé numérique	Valider avec 	
9	Activer le refroidisse- ment rapide	Presser la touche 				
10	Activer mode «stand-by»	Dans le menu princi- pal, presser la touche 				
11	Personnaliser un programme déjà existant.	Charger le programme comme indiqué aux étapes 3 à 5 ci-dessus	Modifier les paramètres	Changer valeur avec pavé numérique	Valider avec 	Pour démarrer, presser touche  ou 
12	Changer programme préconfiguré en pro- gramme personnalisé.	Ouvrir le gestionnaire de données 	Sélectionner l'espace des programmes préconfigurés  	Sélectionner le programme à l'aide de la fonction de sélection 	Cliquer sur «Traiter» 	Sélectionner «Copier» 
		Cliquer sur la touche «Autres» 	Sélectionner l'espace des programmes personnalisés  	Changer le nom du programme et lui attribuer un numéro d'emplacement	Valider avec 	
13	Créer nouveau programme/dossier.	Dans le menu principal, effleurer la touche 	Sélectionner le programme de cuisson/pressée (personnalisé), en effleurant	Effleurer la touche TRAITER 	Presser la touche (programme ou dossier)  	Sélectionner le procédé de cuisson
		Entrer les paramètres	Presser la touche 	Entrer le nom et le numéro du programme	Valider avec 	
14	Modifier réglages (menu principal)	Effleurer la touche 	Effleurer REGLAGES	Personnaliser REGLAGES	Valider avec 	
15	Ajouter aux favoris	Charger programme/ dossier (voir étapes 3 à 5)	Effleurer la touche ETOILE 	Sélectionner le programme/dossier. Son étoile va devenir jaune	L'image des emplacements (favoris) s'affiche. Sélectionner l'emplacement en l'effleurant	Le favori s'affiche automatiquement dans le menu principal
16	Effacer favoris avec 	L'image «Effacer favoris» s'affiche	Sélectionner – en 'effleurant – le favori à effacer.	Le favori n'apparaît plus à l'écran.		