




































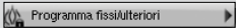



# Guida rapida Multimat® NT/NTpress

Per informazioni dettagliate consultare le Istruzioni per l'Uso. Valido a partire dalla versione 2.0.62

#	Azione	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
		Fase 6	Fase 7	Fase 8	Fase 8	Fase 10
1	Accensione/ spegnimento	Interruttore a levetta on 	Avviare autodiagnostica	Al termine del test di autodiagnostica premere di nuovo (una sola volta)	Una volta visualizzato il menu principale, il forno è pronto per l'uso	
2	Lift sollevato/ abbassato	Toccare tasto sensore 				
3	Richiamo programma	Toccare tasto sensore 	Inserire numero di programma mediante il tastierino numerico	Confermare con 		
4	Ricerca programma mediante PRESSATURA o COTTURA	Toccare tasto sensore  o 	Selezionare programma predefinito o personalizzato	Azionare barre di scorrimento, selezionare in alto o in basso	Selezionare cartella con la ceramica desiderata	Selezionare programma di cottura o pressatura
5	Ricerca programma mediante 	Selezionare programma predefinito o personalizzato	Azionare barre di scorrimento, selezionare in alto o in basso	Selezionare cartella con la ceramica desiderata	Selezionare programma di cottura o pressatura	
6	Avvio/interruzione del programma	Toccare tasto sensore  o 	Selezionare programma predefinito o personalizzato	Toccare il tasto sensore 	Arresto: toccare tasti sensori 	In caso di interruzione confermare con Sì la finestra di avvertenza
7	Modifica parametri di cottura prima della cottura (una volta)	Richiamare programma come descritto nell' azione 3-5	Selezione parametri di cottura	Modificare valore mediante tastierino numerico	Confermare con 	Per avviare, toccare tasto sensore  o 
8	Modifica parametri di cottura durante la cottura (una volta)	Richiamare programma come descritto nell' azione 3-5 e avviare come descritto nell'azione 6	Passare da rappresentazione grafica a parametri	Modificare valore mediante tastierino numerico	Confermare con 	
9	Attivazione raffreddamento rapido	Toccare tasto sensore 				
10	Attivazione Stand-by	Toccare tasto sensore in menu principale 				
11	Personalizzazione di un programma esistente	Richiamare programma come descritto nell' azione 3-5	Selezione parametri	Modificare valore mediante tastierino numerico	Confermare con 	Per avviare, toccare tasto sensore  o 
12	Memorizzazione di programmi predefiniti su programmi personalizzati	Aprire data manager 	Selezionare area programmi predefiniti  	Selezionare programma predefinito mediante funzione di selezione 	Toccare IMPOSTARE 	Selezionare Copia 
		Toccare tasto sensore Weitere (Altri) 	Selezionare area programmi personalizzati  	Inserire nome e numero del programma	Confermare con 	
13	Creazione di nuovo programma o cartella	Toccare tasto sensore in menu principale 	Toccare Selezione programma di cottura o pressatura (personalizzato)	Toccare tasto sensore IMPOSTARE 	Toccare tasto sensore (programma o cartella)  	Selezionare procedura di cottura
		Inserire parametri	Toccare tasto sensore 	Inserire nome e numero del programma	Confermare con 	
14	Modifica impostazioni menu principale	Toccare tasto sensore 	Toccare IMPOSTAZIONE	Personalizzare IMPOSTAZIONE mediante il tastierino numerico	Confermare con 	
15	Aggiungere a Preferiti	Richiamare programma come descritto nell' azione 3-5	Attivare la funzione Preferiti con ASTERISCO 	Selezionare il programma o la cartella. L'asterisco della cartella/programma diventa giallo	Si apre la maschera delle posizioni dei preferiti Selezionare una posizione tocandola	Il preferito viene ora visualizzato direttamente nel menu principale
16	Eliminare Preferiti con 	Si apre la maschera delle posizioni dei preferiti.	Toccare il preferito da eliminare.	Il preferito non viene più visualizzato nel menu principale		