

Executive<sup>®</sup>

Αισθητικά και αρμονικά  
Τεχνητά δόντια  
Δίνοντας ρυθμό στην προσθετική



DENTSPLY

## Δίνοντας ρυθμό στην προσθετική

Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού ρόλου έχουμε ενεργοποιήσει όλες μας τις πηγές: εντατική έρευνα, αξιόπιστα νέα υλικά, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και έλεγχο ποιότητας.

# Executive®

## Αισθητικά και αρμονικά








### Αισθητική και ρεαλισμός στην απόδοση αρμονίας

Τα τεχνητά δόντια οδοντοστοιχιών EXECUTIVE που κατασκευάζονται από INPEN (interpenetrated polymer network-διαπλεκόμενο δίκτυο πολυμερούς), είναι η ιδανική απάντηση στις απαιτήσεις τόσο για αισθητική όσο και οικονομία. Ο ειδικός σχεδιασμός των αποχρώσεων δίνει στα δόντια αυτά φυσική οπαλινότητα και «ζωντανή» εμφάνιση. Η χαμηλή κλίση των φυμάτων των οπισθίων δοντιών (20–22°) διευκολύνουν τη σύνταξη. Καθορίζεται έτσι από την αρχή μία καλή συγκλεισιακή σχέση. Η ισορροπία κατά τη μάσηση επιτυγχάνεται με ευκολία, μειώνοντας την ανάγκη για εξισορροπήσεις στο εργαστήριο και στο ιατρείο, θέτοντας τις βάσεις για γρήγορες και αποτελεσματικές προσθετικές διαδικασίες.

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
### Κωδικοποίηση δεικτών διαφάνειας

Τα τεχνητά πρόσθια δόντια EXECUTIVE διαχωρίζονται σε πέντε υποκατηγορίες με βάση τη θεωρία της αρμονίας των τύπων, κάνοντας την επιλογή δοντιών πιο εύκολη διαδικασία.

1.  Τετράγωνο (S)
2.  Τετράγωνο με αποστρογγυλεμένες άκρες (SO)
3.  Τετράγωνο με κωνική κλίση στο ένα άκρο (ST)
4.  Τετράγωνο με κωνική απόλιξη (αυχένα) (T)
5.  Στρογγυλά/ωσειδή (R)



**Δομή INPEN**  
Ομοιογενής  
τρισιδιάστατη δομή  
και δεσμός πρωτογενών  
και δευτερογενών  
αλυσίδων



δεσμός πρωτογενών  
αλυσίδων

δεσμός δευτερογενών  
αλυσίδων



## Οικονομική ποικιλία από φόρμες

Είκοσι-μία διαφορετικές σειρές διατίθενται για την άνω γνάθο και έντεκα για την κάτω. Αυτή η ποικιλία αυξάνει με πέντε διαφορετικές σειρές για τα οπίσθια δόντια. Όλα τα δόντια EXECUTIVE® διατίθενται σε αποχρώσεις της VITA (A1-D4).

## INPEN® – ακρυλικά δόντια ποιότητας

Το υψηλής ποιότητας υλικό κατασκευής INPEN® (interpenetrated polymer network-διαπλεκόμενο δίκτυο πολυμερούς), είναι η χημική σύνθεση των τεχνητών δοντιών της DENTSPLY. Τα υψηλής σύνδεσης συμπολυμερή δίνουν στο υλικό αυτό τις καλές του ιδιότητες:

- Εξαιρετική αντοχή στην αποτριβή
- Μικρή κατακράτηση πλάκας
- Εξαιρετική σταθερότητα χρώματος
- Εξαιρετική αντοχή στη διάδοση ρωγμών
- Μέγιστο δεσμό σύνδεσης
- Αξιοπιστία για το εργαστήριο και τον ασθενή



Το αποτέλεσμα:  
Υψηλή ποιότητα και  
μεγάλη αντοχή



Executive®

Άνω πρόσθια

Διατίθενται σε αποχρώσεις της Vita (A1-D4)






Φόρμα	Τετράγωνα	πλάτος της σειράς σε mm	μήκος των κεντρικών χωρίς αυχένα σε mm	πλάτος των κεντρικών σε mm
S1		44,0	9,3	8,1
S2		45,5	10,6	8,5
S3		49,0	10,6	9,2
S4		48,0	11,1	8,8
S5		50,5	11,6	9,4





Φόρμα	Τετράγωνα με αποστρογγυλεμένες άκρες	πλάτος της σειράς σε mm	μήκος των κεντρικών χωρίς αυχένα σε mm	πλάτος των κεντρικών σε mm
SO0		40,5	9,2	7,5
SO1		45,0	10,0	8,2
SO2		46,0	11,5	8,6
Φόρμα	Τετράγωνα με κωνική κλίση στο ένα άκρο			
ST1		44,0	10,5	8,1
ST2		45,0	10,8	8,5
ST3		46,5	10,9	8,8
ST6		54,5	12,4	10,2

Executive®

Άνω πρόσθια

Διατίθενται σε αποχρώσεις της Vita (A1-D4)

Φόρμα	Τετράγωνο με κωνική απόλιξη (αυχένα)	πλάτος της σειράς σε mm	μήκος των κεντρικών χωρίς αυχένα σε mm	πλάτος των κεντρικών σε mm
T1		45,5	9,6	8,8
T2		43,5	10,3	8,0
T3		48,0	10,4	8,7
T4		46,5	10,5	8,5
T7		53,5	13,3	10,0

Φόρμα	Στρογγυλά / ωσειδή	πλάτος της σειράς σε mm	μήκος των κεντρικών χωρίς αυχένα σε mm	πλάτος των κεντρικών σε mm
R1		43,5	10,3	8,3
R2		45,5	11,0	8,4
R25		46,5	10,9	8,3
R3		48,5	11,9	9,2

Executive®

## Κάτω πρόσθια

Διατίθενται σε αποχρώσεις της Vita (A1-D4)

Φόρμα

L1



35,5 8,8 5,4

L2



32,0 8,9 5,0

L3



32,0 9,1 4,9

L4



33,5 9,1 5,2

L5



36,0 9,3 5,2

L6



33,5 9,4 5,0

L7



38,5 9,7 5,7

L8



35,5 9,8 5,4

πλάτος της σειράς σε mm  
μήκος των κεντρικών χωρίς αυχένα σε mm  
πλάτος των κεντρικών σε mm

Φόρμα

L9



35,5 10,3 5,5

L12



38,5 11,9 5,9

L13



37,0 12,8 5,8

πλάτος της σειράς σε mm  
μήκος των κεντρικών χωρίς αυχένα σε mm  
πλάτος των κεντρικών σε mm

Executive®

Οπίσθια

Διατίθενται σε αποχρώσεις της Vita (A1-D4)

Φόρμα



## Ακριβής επιλογή χρώματος



Με τον αυθεντικό οδηγό Executive σε αποχρώσεις της Vita (A1-D4)

Κωδικός D 01 027 215

## Πίνακας συνδυασμών

Executive® άνω πρόσθια	Executive® κάτω πρόσθια	Executive® οπίσθια
<b>Τετράγωνα</b>		
S1	L3	33
S2	L4	33
S3	L5	34/36
S4	L5	33
<b>Νέο</b> S5	L7	34/36
<b>Τετράγωνα με αποστρογγυλεμένες άκρες</b>		
<b>Νέο</b> SO0	L2	31
SO1	L3	33
SO2	L7, L8, L9	34/36
<b>Τετράγωνα με κωνική κλίση στο ένα άκρο</b>		
ST1	L2	31/32
ST2	L3	31/32
ST3	L1	33
<b>Νέο</b> ST6	<b>Νέο</b> L12, L13	34/36
<b>Τετράγωνα με κωνική απόλιξη (αυχένα)</b>		
T1	L4	33
T2	L2	31/32
T3	L1, L8	33/36
T4	L3	33
<b>Νέο</b> T7	<b>Νέο</b> L12, L13	36
<b>Στρογγυλά / ωσειδή</b>		
R1	L6	32
R2	L4	32
<b>Νέο</b> R25	L1, L8	32
R3	L5	34/36



## Συνδυαζόμενα προϊόντα

Για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υλικών για προσθετικές αποκαταστάσεις. Όλα τα προϊόντα συνδυάζονται απόλυτα με τις σειρές τεχνητών δοντιών της εταιρείας.

### Selectaplus / Selectaplus H

Χημικά πολυμεριζόμενη και θερμοπολυμεριζόμενη ρητίνη για ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες, επιδιορθώσεις και αναγομώσεις. Η ρητίνη Selectaplus χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή στα κατάγματα, χρωματική σταθερότητα και αντίσταση στην κατακράτηση πλάκας.

### StarLoy L

Κράμα χρωμιοκοβαλτίου για χύτευση μεταλλικών σκελετών. Το StarLoy L χαρακτηρίζεται από χαμηλό σημείο τήξης για χυτά υψηλής ποιότητας και είναι ιδιαίτερα σκληρό.

CE 0088 ISO 3336

Manufacturer:

**DENTSPLY Brazil**  
25665-010-Petrópolis-RJ · Brazil

EU-Representative:

**DeguDent GmbH**  
P.O. Box 1364 · D-63403 Hanau · Germany  
www.dentsply-degudent.com

**N+D NewDent E.P.E.**  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

Εγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη  
Τηλ. (2310) 270 500, 270 850  
Fax (2310) 270 850

### SilberStar

Πυρόχωμα για χύτευση κραμάτων με ιδανική ροή και σταθερή επιφάνεια εκμαγείου.

### ReproStar

Σιλικόνη προσθήκης δύο συστατικών, κατάλληλη για όλες τις τεχνικές ντουμπλαρίσματος. Εγγύηση για σταθερή αναπαραγωγή και αντοχή στην απόσχιση.

### Triad Custom Tray

Υλικό για την απλή κατασκευή σταθερών και ανθεκτικών ατομικών δισκαρίων. Δεν απαιτείται αναμονή.

### Isolant

Γύψος κατασκευής εκμαγείων και διαχωριστικό υγρό για κατασκευή οδοντοστοιχιών και επιδιορθώσεις.

### Pinnacle-Modelling Wax

Κερί για σύνταξη δοντιών και διαμόρφωση μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών.



Φειδιππίδου 43, 115 27 Αθήνα  
Τηλ. (210) 7489 031, (210) 7488 640  
Fax (210) 7489 032  
e-mail info@faratzis.gr

**DENTSPLY**